

○ 受診者様ご対応

○ 当院対応


1



検査申し込み

同意書(唾液がんリスク検査申込書)にご署名ください。ご家族分など複数申し込みも可能です。


2

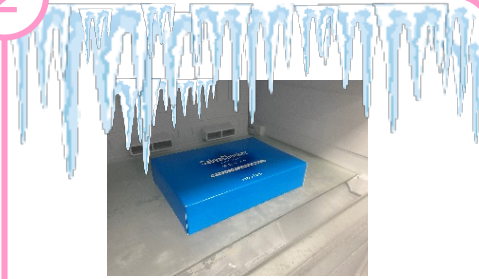

青い箱を冷凍庫へ

帰宅後、採取容器と保冷剤が入っている青い箱を冷凍庫で冷やしてください(採取の3時間以上前から)。

3

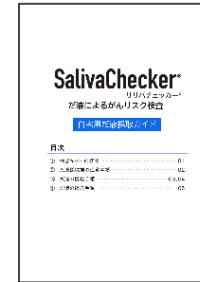

「自宅用だ液採取ガイド」を必ずお読みください

4



だ液を採取してすぐに冷凍庫へ

- 採取容器にご自身の氏名が記載されていることをご確認ください(2つ目の採取容器とストローは予備です)。
- 採取後は容器をインナートレイにはめて、青い箱に戻し、すぐに冷凍庫で凍らせてください。12時間以上で完全に凍ります。

5



白い外箱に梱包

だ液が凍ったことを確認できたら、青い箱ごと白い外箱に入れ、同梱のヤマト送り状を指定枠内に貼り付けてください。白い外箱には青い箱が2個(2人分)まで入ります。

6



ヤマト冷凍便で発送

発送代金は受診者様負担となります。

7

発送から3~4週間後



検査結果について

来院された際にご説明いたします。

■ご不明な点やご質問がございましたら、当院までお問い合わせください。

医療機関