

貴院で唾液を採取する場合

○ 貴院ご対応 ○ 受診者様ご対応

1



青い箱を冷凍庫へ

- インナートレイを青い箱ごと冷凍庫で保管して下さい(採取の3時間以上前から)。

2



検査申し込み・唾液の採取

- 採取容器に受診者様の氏名をご記入ください。
- キット内のヤマト送り状の発送元欄に貴院名・住所・電話番号をご記入ください。
- 唾液検査レポートシステムで受診者様の登録をしてください。
- 唾液を採取後、すぐに冷凍庫に保管してください。


3



冷凍便で発送

- ヤマト便で発送してください(発送代金は貴院負担)。

4

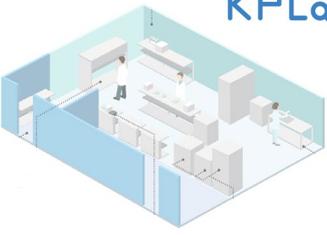

KPLab

カイゲンファーマ臨床検査研究所にて唾液の成分を測定

5



検査結果のご説明

- 唾液検査レポートシステムからダウンロードしていただき、受診者様へのご説明をお願いします。

唾液検査レポートシステム



<https://www.salivatech.net>

上記の専用URLにログインして検体登録をお願いします。

ユーザーID・初期パスワードはご契約時にお送りした書面をご確認ください。

受診者様が自宅で唾液を採取する場合

1



検査申し込み

- 採取容器(予備も含めて2本とも)に受診者様の氏名をご記入ください。
- キット内のヤマト送り状の発送元欄に貴院名・住所・電話番号をご記入ください。
- 唾液検査レポートシステムで受診者様の登録をしてください。

必ず貴院のご担当者様にご記入ください。

2



青い箱を冷凍庫へ

- インナートレイを青い箱ごと冷凍庫で保管して下さい(採取の3時間以上前から)。

3



唾液を採取してすぐに冷凍庫へ


4



冷凍便で発送

- ヤマト便で発送してください(発送代金は受診者様負担)。

5

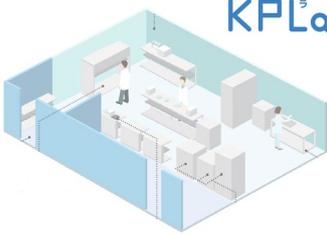

KPLab

カイゲンファーマ臨床検査研究所にて唾液の成分を測定

6



検査結果のご説明

- 唾液検査レポートシステムからダウンロードしていただき、受診者様へのご説明をお願いします。